

JUMPER


Shenzhen Jumper Medical Equipment Co., Ltd. | JPD-FR202

Obrigado por comprar este termómetro infravermelho. Por favor, leia o manual de instruções para garantir que este é usado de forma segura e adequada e leia atentamente todas as instruções de segurança antes de o utilizar. Mantenha o manual de instruções com este termómetro para referência futura.

Conteúdo da Embalagem


No.	Nome	Quantidade
1	Termómetro Infravermelho	1
2	Bolsa de Transporte	1
3	Pilhas (AAA)	2
4	Manual de Instruções	1

Estrutura do Produto

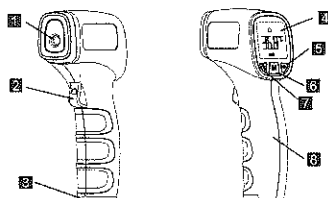

1. Sensor de infravermelhos
2. Botão para ligar/botão de medição
3. Tampa da bateria
4. Visor LCD
5. Botão de som/sem som
6. Botão de modo
7. Botão de Celsius/Fahrenheit
8. Punho

Descrição do Visor

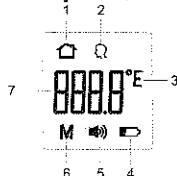

1. Modo de temperatura do objeto
2. Modo de temperatura da testa
3. Unidade de temperatura (°C/°F)
4. Indicador de bateria baixa
5. Som/Sem som
6. Modo de memória
7. Valor da temperatura



Instruções de som e luz de fundo

Distância	Som	Luz de fundo
Temperatura da testa		
34.9°C-37.5°C/94.8°F-99.5°F	Beep longo	Verde
37.6°C-42.2°C/99.6°F-108.0°F	3 beeps duplos curtos	Vermelho
Temperatura do objeto		
0°C-100°C/32.0°F-212.0°F	Beep longo	Branco

Nota: Quando a temperatura está entre 34,9 °C / 94,8 °F e 37,5 °C / 99,5 °F, é emitido um sinal sonoro longo e uma luz de fundo verde.

Processo de medição

- 1. Selecione modo de medição**
Pressione o botão Medir para ligar o termómetro e selecione o modo de medição usando o botão Modo.
O símbolo indica o modo de temperatura da testa. O símbolo indica o modo de temperatura do objeto.
- 2. Pressione o botão Medir para iniciar a medição**
Ao medir a temperatura da testa, aponte o sensor de infravermelho ao centro da mesma. Mova o termómetro para a testa a uma distância de ½ "a 2" (1-5 cm). Pressione e solte o botão Medir. A temperatura da testa será exibida no visor.
Ao medir a temperatura do objeto, aponte o sensor infravermelho para o centro do mesmo a uma distância de ½ "a 2" (1-5 cm). Pressione e solte o botão Medir. A temperatura do objeto será exibida no visor.

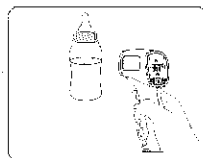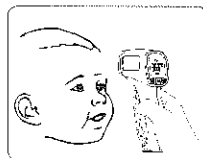

- 3. Depois da medição**
Após cada medição, limpe o termómetro com um pano macio e seco e guarde-o num local seco e bem ventilado.
O termómetro desliga automaticamente se não for usado durante 10 segundos.

Solução de problemas

Problema	Possível causa	Solução
O termómetro não liga	Bateria baixa	Substituir as pilhas
	As polaridades das baterias estão invertidas	Verificar se as pilhas estão colocadas corretamente
	O termómetro está danificado	Entrar em contacto com o fabricante

Termómetro Infravermelho | Manual de Instruções

"Er!" aparece no visor	A temperatura ambiente é inferior a 10 °C (50,0 °F) ou superior a 40 °C (104 °F).	Realize uma medição de uma temperatura ambiente entre 10 °C (50,0 °F) e 40 °C (104 °F).
A leitura da temperatura é mais baixa que a temperatura corporal mínima comum	A lente da sonda de temperatura está suja	Limpe a lente com algodão
	A distância entre a sonda de temperatura e o alvo é demasiado grande	Mova o termómetro para mais perto do alvo
	O termómetro é utilizado nos 30 minutos a seguir a ser retirado de um ambiente frio	Espere mais de 30 minutos depois de o termómetro ser movido para o ambiente de medição
A leitura da temperatura é mais alta que a temperatura corporal máxima comum	A sonda de temperatura está danificada	Contacte o fabricante

Especificações

Nome do produto	Termómetro infravermelho
Modelo do produto	JPD-FR202
Modo de fonte de energia	Fonte de alimentação interna
Tensão elétrica operacional	DC 3V
Modelo da bateria	AAA x 2
Modo operativo	Funcionamento contínuo
Visor	Segmento LCD
Tempo de medição	Cerca de 1 segundo
Tempo de latência	Cerca de 1 segundo
Emissividade	0.95
Distância de medição	½" a 2" (1 a 5 cm)
Alcance da medição	Testa: 34.9°C-42.2°C (94.8°F-108.0°F) Objeto: 0.0 °C - 100.0 °C (32.0 °F - 212.0 °F)
Exatidão (laboratorial)	± 0,4 °F / ± 0,2 °C de 94.8 °F a 108.0 °F (34.9 °C a 42.2 °C)
Resolução	0.1°C (0.1°F)
Memória	20 leituras de temperatura
Alerta de bateria fraca	O símbolo de bateria fraca é exibido se a tensão de alimentação for menor que 2,5 V ± 0,1V
Desligamento automático	O termómetro desliga-se automaticamente se não for usado durante 10 ± 1 segundos.
Dimensões (mm)	150×88,2×40,6
Peso (g)	109.5 g (com pilhas)
Ambiente operativo	Temperatura: 10 °C - 40 °C (50 °F - 104 °F) Humidade: 15% - 95% RH, sem condensação Pressão atmosférica: 86-106 kPa
Transporte e armazenamento	Temperatura: -20 °C a 55 °C (-4 °F a 131 °F) Humidade: 0-95% RH, sem condensação Pressão atmosférica: 50-106 kPa

JUMPER

JPD-FR202 | CNP 6620435

CE 0482



Shenzhen Jumper Medical Equipment Co., Ltd.
Address: D Building, No. 71, Xintian Road, Fuyong Street, Baoan, Shenzhen, Guangdong, China
Tel: +86-755-26696279
Fax: +86-755-26852025
Website: <http://www.jumper-medical.com>

EC REP

Wellkang Ltd
Suite B, 29 Harley Street, London W1G 9QR, UK