



MANUAL DE UTILIZAÇÃO

CAMA STELLA

INTRODUÇÃO

Este manual foi elaborado tendo em conta o utilizador/paciente, com informações simples, para que a cama Modelo STELLA concebida para os cuidados ao domicílio, corresponda à solução que melhor resolva as necessidades do utilizador/paciente. Todas as referências desta cama, mesmo a versão Light, contemplam os movimentos referidos na página 4 deste manual.

Antes de utilizar este produto deve ler cuidadosamente este manual, por forma a garantir a segurança do utilizador/paciente, assim como, o tempo de vida útil da cama (5 anos caso seja respeitada a correta utilização consoante indicações deste manual).

Sempre que for necessário referir-se a aquisição de acessórios/peças para a cama usando a esquerda ou direita da mesma, deve fazê-lo na posição de deitado de costas e com a cabeça nas costas/cabeceira da cama.

Este manual refere-se aos produtos cujas referências são:

Ref. ^a	ESTRUTURA	ESTRADO	CABECEIRAS E GRADES			Peso (Kg)
	Aço Pintura Epoxy	Réguas Faia	Versão Standard	Versão Light	Pés c/ 4 rodas Ø100mm c/ travão	
10.CM.6099	√	√	Com grades		√	56
10.CM.6099.1			Sem grades			
10.CM.6099.2				Com grades		
10.CM.6099.3				Sem grades		



Fim a que se destina

A cama Stella foi concebida para descanso do paciente nos cuidados ao domicílio, potenciando a máxima autonomia. É apropriada no tratamento ou atenuação de uma doença, lesão ou deficiência.

A conceção do modelo Stella, teve em conta a norma EN 60601-2-52 no que diz respeito à segurança de camas elétricas e respetivas grades.

CUIDADOS E INDICAÇÕES A TER EM ATENÇÃO

ATENÇÃO: Não utilize esta cama como carro de transporte ou maca. Apesar de todos os cuidados e indicações do fabricante, apela-se ao bom senso e às boas práticas dos utilizadores seguindo as indicações do pessoal médico ou do cuidador mediante a utilização desta cama consoante o estado psico-motor e a própria morfologia do utilizador/paciente, avaliando se é adequado o seu uso ou não, com o objetivo de prevenir riscos. Por exemplo a opção de Trendelenburg e Anti-trendelenburg só deve ser usada com indicação ou supervisão médica.

- A cama Stella é fornecida acondicionada na posição vertical (através do Kit de Transporte) para facilitar o transporte e o armazenamento, sendo apenas necessário uma montagem final no cliente, ver esquema 1.
- A cama Stella deve ser usada para o fim para o qual foi concebida.
- A cama Stella está preparada para receber um paciente de cada vez (com idade igual ou superior a 12 anos de idade) com peso até 135 Kg. Peso máximo admissível (paciente + acessórios) 170Kg.
- Antes de colocar o paciente na cama certifique-se se a estrutura está corretamente instalada / montada.
- Verifique a existência de mobiliário, objetos em redor da cama que possam interferir no seu funcionamento, articulação ou elevação em altura, quando acionar as funções da cama através do comando.
- Em caso de um paciente acamado, verifique SEMPRE e GARANTA uma altura mínima de 220mm entre o colchão e a guarda/ cabeceira/ peseira, de forma a evitar quedas se o paciente se mexer. Da mesma forma, para minimizar a queda de um paciente da cama esta deve estar sempre na altura mínima.
- A cama/leito deve ser ajustada à altura do paciente para a entrada e saída do mesmo.
- É recomendado um colchão simples de baixa densidade com 6 rasgos (1820x890x100mm) com tela impermeável e ignífuga com fecho em L (10.AC.1039). Não se deve usar colchão com mais de 150mm de espessura.

CUIDADOS COM O MOTOR/COMANDO

Elevar o segmento das costas

Elevar o segmento dos pés

Elevar o segmento das costas e dos pés em simultâneo

Elevar o leito

Elevar o motor da cabeceira posição de Anti-trendelenburg e baixar o motor da peseira



Baixar o segmento das costas

Baixar o segmento dos pés

Baixar o segmento das costas e dos pés em simultâneo

Baixar o leito

Baixar o motor da cabeceira posição de Anti-trendelenburg e subir motor da peseira

Foto 1

- 3 motores e comando que fazem a articulação do leito e a elevação do mesmo, sendo necessário estar sempre ligados à corrente elétrica para um funcionamento contínuo. Para garantir este funcionamento contínuo, pode opcionalmente ser equipada com bateria para funcionar em casos de interrupção de energia elétrica.
- Para remover um motor (em caso de substituição), basta retirar os 2 parafusos que fixam o mesmo à estrutura da cama.
- Evitar o derramamento de líquidos por cima do motor e do comando.
- Os motores cumprem as exigências das diretivas comunitárias respeitantes à compatibilidade eletromagnética e às baixas tensões e o nível de ruído é <70 dB (A), (indicação do fabricante).
- Os motores têm marcação CE e garantia de 2 anos contra comprovados defeitos de fabrico. Esta garantia não cobre os danos causados pelo mau manuseamento do motor, cabo, comando e ficha ou desrespeito pelas indicações de montagem do mesmo na estrutura do sistema elevador e estrado (cama).
- Após o seu tempo de vida útil, o motor elétrico deve ser entregue numa entidade licenciada, para a eliminação de resíduos de acordo com a legislação em vigor.
- A cama só deve ser usada em ambientes interiores, nunca no exterior ou ao ar livre.

- Após a remoção da embalagem, recomenda-se a verificação de todos os componentes, procedendo se necessário à montagem de acordo com as instruções.

LIGAÇÃO MOTORES E COMANDO

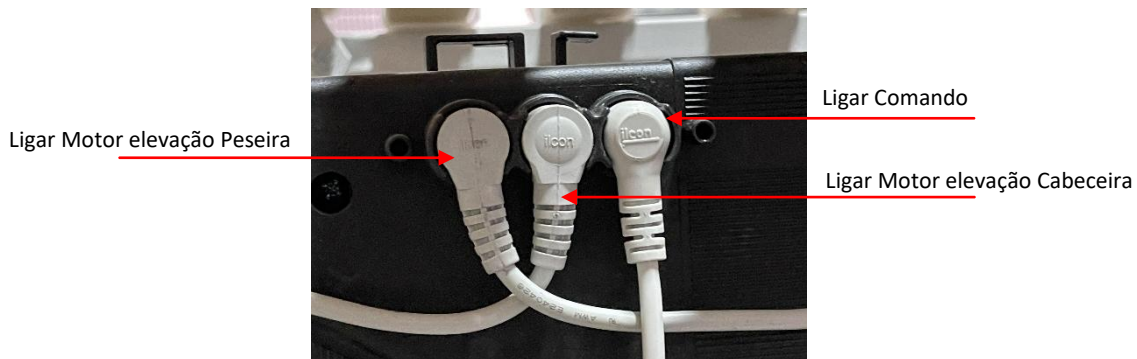


Foto 2

MOVIMENTOS POSSÍVEIS DA CAMA

Altura Mínima – 350mm



Altura Máxima – 750mm



Anti-Trendelenburg



Trendelenburg



Posição Sentado



Posição Deitado



Costas Elevadas




Posição Vascular



INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Esquema 1

1

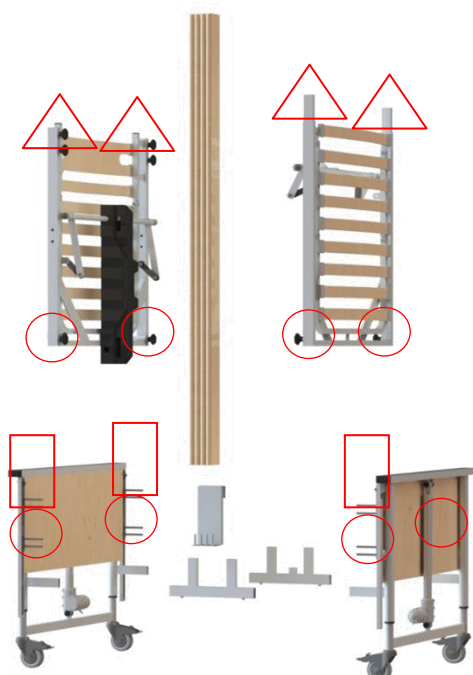

Passo 1

Remover a embalagem e as Peças 1, 2, 3, 4. Coloque estas peças, no encaixe próprio por baixo do estrado junto à cabeceira.

Passo 2

Retirar as 4 peças do Kit de Transporte

Passo 3

Unir as 2 partes do estrado assinaladas  Introduzir os tubos retangulares das cabeceiras nas extremidades do estrado assinalados  Introduzir os 16 casquilhos redondos nas 4 réguas das grades assinalados . **ATENÇÃO à posição dos furos das grades,** observe o Esquema 2 desta página.

Passo 4

Ajuste as grades, o estrado e as cabeceiras apertando os respetivos manípulos.

Passo 5

Verifique o funcionamento das grades.


Passo 6



Ligue a ficha do motor à energia elétrica e verifique o funcionamento do mesmo e das articulações/elevação e demais funções da cama.

Esquema 2



DIMENSÕES - KIT TRANSPORTE (EM MILÍMETROS)

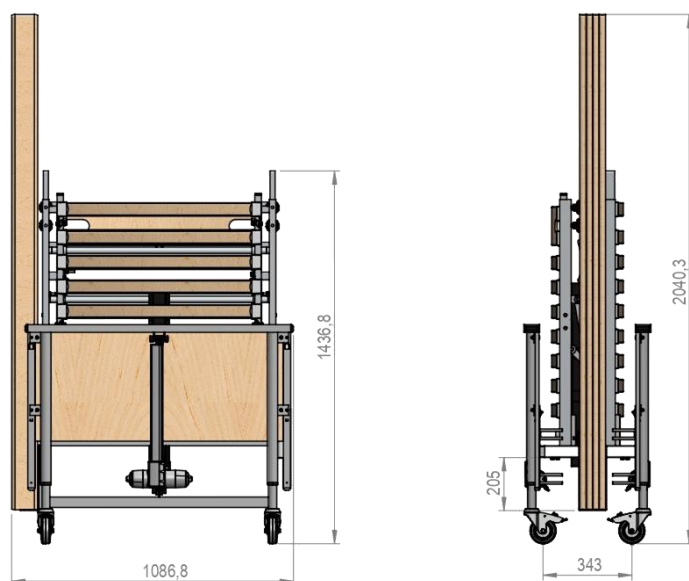

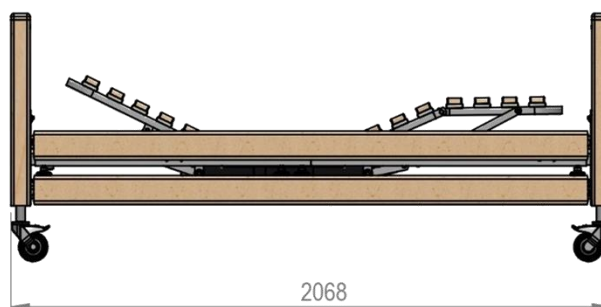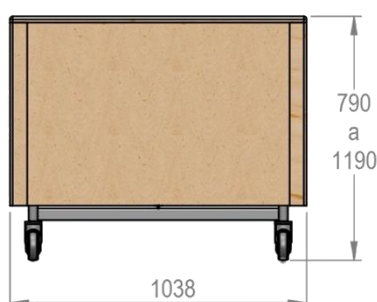

- **Atenção ao possível perigo de esmagamento dos dedos ou mãos nas partes móveis:**
- Entre a cabeceira quando é articulada e a estrutura.
- Entre as 4 partes do leito e o suporte de estrado.
- No espaço entre as 4 partes do leito.



Muita atenção a este símbolo, ele está localizado junto das zonas de contato de duas superfícies, podendo ocorrer esmagamento devido ao movimento das secções articuladas, caso os dedos ou mãos estejam sobre zona de contato.

FUNCIONAMENTO DA GUARDA/GRADE

Para fazer descer a guarda/grade, basta aliviar a grade de cima e pressionar o botão situado na calha/perfil da cabeceira fazendo deslizar a guarda/grade para baixo. Para subir as guardas/grades basta levantar a grade de cima até ouvir o "click".



LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Para limpar use um pano húmido e macio e de seguida passe um pano seco.
- Nas operações de limpeza não utilizar detergentes e/ou materiais que possam danificar ou riscar.
- Nas operações de limpeza e desinfeção recomenda-se a utilização de um produto apropriado para limpeza e desinfeção de dispositivos médicos. A frequência da limpeza deverá ser determinada em função das necessidades, do local onde a cama se encontra e das vezes que é usada.
- **Nunca utilize** estações de lavagem automática, lavagem em túnel, água a alta pressão ou sprays líquidos, nas operações de limpeza. Corre o risco de danificar o acabamento/pintura.
- Não utilize solventes como benzeno, álcool ou substâncias semelhantes!

EMBALAGEM E ARMAZENAMENTO

- A cama Stella é fornecida acondicionada num Kit de Transporte, embalada em filme ou cartão, sendo necessário apenas a remoção da embalagem, procedendo depois à montagem final conforme esquema anterior.
- Deve ser armazenada em locais com temperatura e humidade controlada (temperatura abaixo dos 25°C, humidade inferior a 60%), de forma a não danificar a embalagem nem o produto.
- Deve estar protegida de eventuais quedas de objetos, armazenada na posição vertical, **não devendo ser empilhada**.
- A JMS não assume qualquer responsabilidade por danos causados por mau uso, desrespeito destas ou outras indicações ou negligência na utilização e manuseamento do produto.
- A JMS reserva-se o direito de efetuar qualquer alteração ao design, funcionalidade, estética e comercialização dos seus produtos, em qualquer altura, sem aviso prévio, bem como, a atualização deste manual sempre que necessário.

PROTEÇÃO DO AMBIENTE (ELIMINAÇÃO E RECICLAGEM)

A JMS preocupa-se com a preservação do Ambiente em tudo o que faz. Solicitamos que:

- Separe os resíduos da embalagem e os encaminhe para os ecopontos correspondentes ou para operadores licenciados.
- Após o tempo de vida útil, entregue o produto a um operador licenciado.
- Não coloque o produto no lixo junto de resíduos comuns.

Obrigado pela sua colaboração!





JMS - Indústria de Mobiliário Hospitalar, SA
Rua Zona Industrial do Bunheiro, 26
3870-021 Murtosa
E-mail: jmsl@jmshospitalar.com
Website: www.jmshospitalar.com