

## Rampa Drive-in

- Obrigado por comprar um produto FEAL!
- Certifique-se que a rampa não danifica durante o transporte.
- Leia com atenção as instruções e utilização e os perigos que podem existir antes de utilizar a rampa.
- Em cada rampa tem um autocolante a indicar o peso máximo da rampa.

**Utilize a rampa com cuidado e consciência. É importante que seja colocada em superfícies estáveis e seguras.**

- A altura da rampa pode ser ajustada com parafusos ajustáveis fornecidos com a rampa (figura A)
- Observe a diferença no tamanho dos suportes de reforço (figura B).
- O suporte de reforço menor deve estar no interior e o maior no exterior, quando os parafusos ajustáveis estiverem fixos com uma porca no interior e outra no exterior. (figura C)
- Se acontecer algum dano em alguma rampa, não volte a utilizar até ser reparada por um especialista.

## Cuidado e acondicionamento

- Normalmente não é necessária manutenção se os parafusos estiverem instalados corretamente.

## Desmontagem e reciclagem

- Todo o material é 100% reciclável. O alumínio é considerado sucata.



Figura A



Figura B



Figura C

