



# Ayudas Dinámicas

## MANUAL DE USUARIO



ANDARILHO FIXO E ANDARILHO DOBRÁVEL (Ref. AD233)



ANDARILHO DE INCORPORAÇÃO DOBRÁVEL (Ref. AD232)

## MODELOS:


### AD233 Andarilho fixo e andarilho dobrável com altura regulável.

Andarilho 2 em 1 Pode ser utilizado como andarilho fixo ou andarilho (pode avançar alternadamente para a esquerda e para a direita), bastando para isso trocar os pinos. É feito de alumínio, é dobrável e ajustável em altura.



### AD232 Andarilho fixo dobrável com altura regulável.

Além de andarilho, serve de auxílio para se levantar da posição sentada. Fabricado em alumínio, dobrável e regulável em altura.

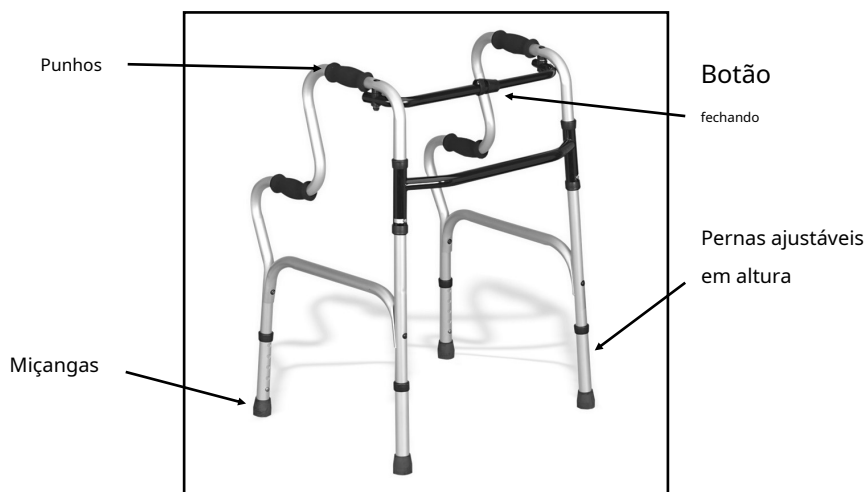

## EXIBIDO

(Para os modelos AD233 e AD232)

Segure os dois punhos e abra o andarilho até ouvir um clique, como mostra a imagem.

Verifique se o andarilho não pode ser fechado novamente, aplicando uma pequena pressão para dentro nas alças para garantir que está bloqueado na posição de utilização.


## CONFIGURAÇÃO DE FIXO PASSOS ANDADOR.

(Para o modelo AD233)


Uma vez implantado o andarilho, escolha o tipo de marcha que vai utilizar. O andarilho pode ser configurado como fixo ou ambulatório, bastando para isso alterar a posição dos dois degraus ou clips.

**O andarilho vem configurado de fábrica na posição de marcha, pelo que se necessitar deste tipo de movimento não deverá fazer nada.**



Caso pretenda que este permaneça fixo e não se mova, deve alterar a **posição 2** os dois pinos ou

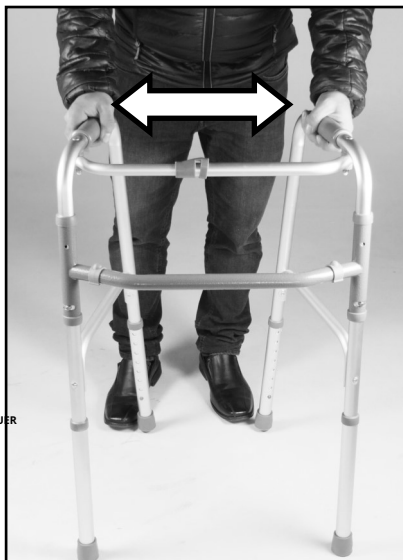

**POSIÇÃO 1  
CAMINHANTE  
(SERIAL)**

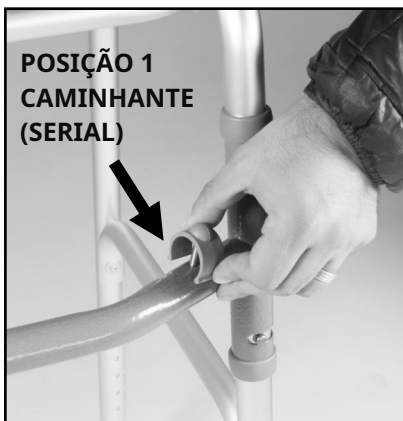

**POSIÇÃO 2  
FIXO**

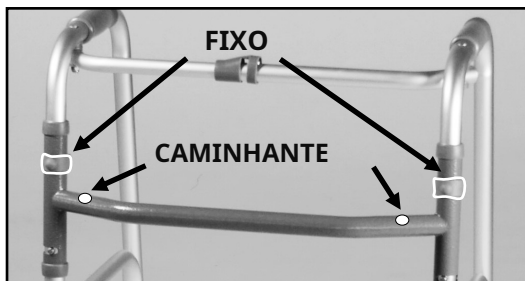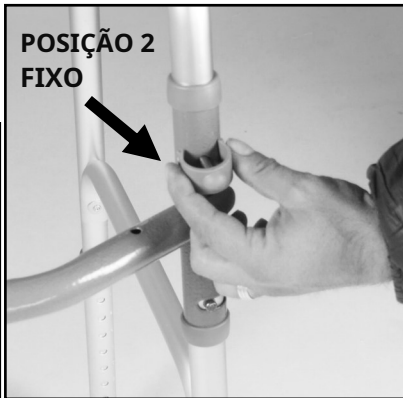

## DOBRADO

### MODELO AD233




Para dobrar o andarilho **modelo**

Apenas no caso de o ter na posição FIXA, se deve retirar os pinos ou clips da posição para a posição 1 (ANDAR conforme indicado nas fotografias).

Concluída a etapa, pressione o botão de fecho (fig) agarrando-o pelas pegas laterais do andarilho como mostra a figura 2.

### MODELO AD232


Para dobrar ele **modelo**  
Basta pressionar o botão de fecho (figura 1) e agarrá-lo e fechar as laterais dos punhos como mostra a figura 2.

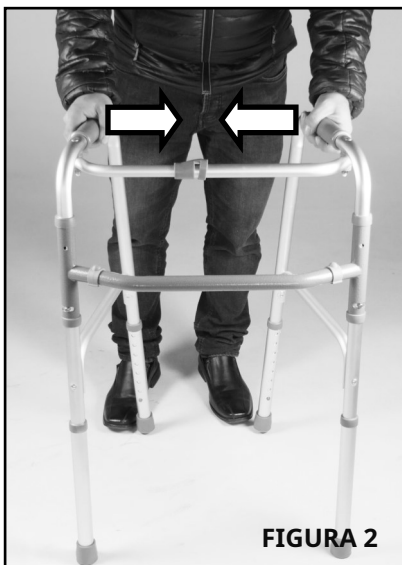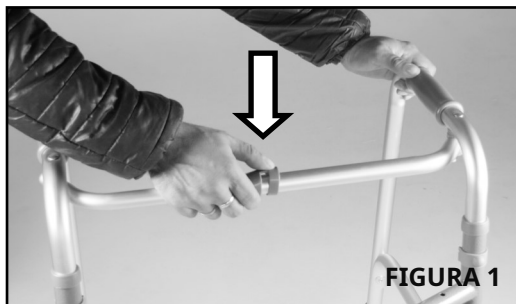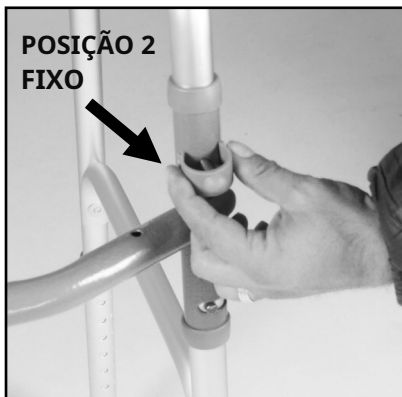

## REGULAÇÃO DO AJUSTE DE ALTURA DOS PUNHOS


O andarilho vem ajustado de fábrica na posição mais baixa.

Para ajustar a altura do andarilho, basta pressionar o botão na perna e deslizar até à altura desejada.

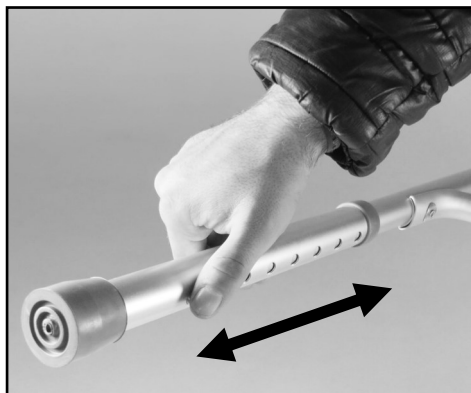

É muito importante utilizar o andarilho ajustado à altura correta. Isto incentiva a pessoa que o utiliza a manter uma boa postura; posição ereta com o cotovelo ligeiramente fletido cerca de 20 ou 30°. O peso é naturalmente suportado pelo andarilho quando a pessoa caminha.

Ao medir o andarilho deve usar os seus sapatos habituais. De pé, as pegas do andarilho devem estar à altura do pulso do braço em repouso (ver ilustração).

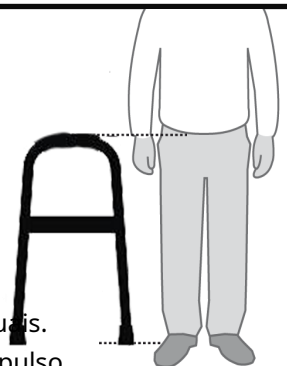

## **SEGURANÇA**

- Este auxílio é fabricado para utilização por pessoas com um peso máximo de 100Kg. As pessoas que ultrapassam esse peso estão excluídas do seu uso.
  - Quando utilizar este andarilho, lembre-se que a sua estabilidade depende do contacto das quatro pernas com o solo e, por isso, o andarilho só deve ser utilizado em superfícies planas e firmes.
  - O andarilho só tem estabilidade quando está totalmente desdobrado.
- Verifique se o andarilho não pode ser fechado novamente, aplicando uma pequena pressão para dentro nas alças para garantir que está bloqueado na posição de utilização.
- Certifique-se de que as roupas ou outros objetos não ficam presos ao dobrar. Tenha também cuidado para não prender os dedos ao dobrar ou desdobrar o andarilho. Para sua segurança, as mãos devem estar sempre nas pegas ao operar o andarilho e ao dobrá-lo ou desdobrá-lo.

## **LIMPEZA**

Não utilize detergentes abrasivos para limpar o andarilho. Um pano macio e água morna com sabão são geralmente suficientes para o manter limpo.

## **MANUTENÇÃO**

- Verifique regularmente se o andarilho tem folga excessiva.
- Verifique periodicamente os parafusos e as porcas.
- Verifique se as quatro pernas estão ajustadas à mesma altura. Certifique-se de que os botões de ajuste de altura nas quatro pernas estão totalmente visíveis e não afundados.
- Deve ter-se em conta o estado das extremidades das pernas e substituí-las por novas quando apresentam maior desgaste.

## DADOS TÉCNICOS

Todos os modelos são fabricados em alumínio e suportam um peso máximo de 100Kg.

| MODELO | ALTURA                   | LARGO | FUNDO |
|--------|--------------------------|-------|-------|
| AD233  | De 79 a 96,5 centímetros | 52cm  | 46cm  |
| AD232  | De 79 a 92 centímetros   | 56cm  | 51cm  |

## GARANTIA

A garantia estende-se por 2 anos, de acordo com a Lei de Garantia em vigor, que se refere a todos os defeitos de material ou de fabrico. Os danos causados por desgaste natural ou uso indevido estão excluídos da garantia.

Se necessitar de reparação do seu produto, contacte o distribuidor que o vendeu. Através dele, a fábrica dar-lhe-á todo o apoio da sua garantia.

Importado por:

**Sida Tecno Dinámicas SL**

c/Llobregat 12, Santa Perpétua, 08130, Barcelona

Tel. 935 74 74 74 Fax. 935 74 74 75

[info@ayudasdinamicas.com](mailto:info@ayudasdinamicas.com)

[www.ayudasdinamicas.com](http://www.ayudasdinamicas.com)



**BLISS HEALTH PRODUCTS Co., Ltd.** N° 96

Zhaoyi Road, DongSheng Town

ZhongShan City, GuangDong, China