



Ayudas Dinámicas

MANUAL DO UTILIZADOR AD 537A-AS-C-CS



LEIA AS INSTRUÇÕES COM ATENÇÃO ANTES DE UTILIZAR OS ASSENTOS DE DUCHE

Guarde estas instruções, podem ser-lhe úteis mais tarde.

Indicações

Cadeiras em alumínio. Assento e encosto em plástico, com formas arredondadas, sem arestas agressivas. São ajustáveis em altura.

Os modelos de cadeiras AD 537C e AD 537CS possuem um assento em forma de U e facilitam o acesso para a higiene íntima.

Avisos de segurança

Leia estas instruções cuidadosamente antes de montar e utilizar a sua cadeira.

- Utilize a cadeira apenas em terreno plano e firme.
- O peso máximo do utilizador é de 100 kg.
- Antes de se sentar, certifique-se de que a cadeira está devidamente montada e que os alfinetes de dama estão corretamente posicionados.

Risco de acidente

- Utilize a cadeira apenas se estiver em perfeitas condições.
- Utilize apenas peças sobressalentes originais.
- Não faça qualquer alteração estrutural na cadeira.
- Certifique-se de que a cadeira está apoiada em segurança nas quatro pernas do chão.

Conteúdo da caixa

Verifique se recebeu todas as peças antes de começar a montá-lo. Não monte se notar que alguma peça está em falta ou danificada.

- 1 x Cadeira de banho com encosto ou cadeira de banho sem encosto.
- 1 x Manual do utilizador.

Configurações

Fixe o encosto (apenas AD537A e AD537C)

As cadeiras AD537A vêm com o encosto removido.

Para o montar é necessário retirar os parafusos localizados nas pernas por baixo do assento. Coloque o encosto centrando os orifícios dos tubos do encosto com os dos tubos das pernas. Uma vez centrado, pode voltar a colocar os parafusos e apertá-los.

As cadeiras AD537C vêm com o encosto removido. Para o montar, deve-se encaixar os 2 tubos do encosto nos 2 tubos do assento até se ouvir um “clique”.

Ajustar altura

As cadeiras e os bancos podem ser ajustados em altura em 5 posições diferentes.

Para ajustar a altura das pernas:

- Pressione os pivôs para dentro
- Desloque a perna até à altura desejada
- Fixe a perna, verificando se o pivot sai e está fixo

**Cuidado!**

Antes de utilizar a cadeira ou o banco, certifique-se de que as pernas estão bem fixas e os pivôs estão nos orifícios correspondentes. Certifique-se também de que as quatro pernas estão ajustadas à mesma altura.

Utilização**Atenção! Perigo de queda**

- Sente-se sempre no meio da cadeira ou do banquinho
- Sente-se sempre voltado para a frente na cadeira ou banquinho
- Para se sentar ou levantar, peça ajuda a outra pessoa ou segure-se num local seguro. As cadeiras AD537A e AD537AS possuem pegadas integradas para maior aderência.
- Não suba para a cadeira ou banquinho

Para colocar a cadeira ou o banco certifique-se de que:

- Todas as quatro pernas estão à mesma altura e seguras
- Deixe espaço livre para se movimentar

Limpeza

Pode ser limpo com qualquer detergente comum suave e não abrasivo. Seque a cadeira ou o banco com um pano macio. Caso seja necessária desinfeção, faça-a com produtos convencionais.

Dados técnicos

MODELO	LARGO	ALTO TOTAL	FUNDO TOTAL	LARGO ASSENTO	FUNDO ASSENTO	ALTO ASSENTO	PESO MÁX.	PESO TOTAL
537 d.C.	46cm	68 - 80cm	48cm	48cm	28cm	36 - 46cm	100kg	2,8kg
537 DC AS	46cm	-	48cm	48cm	28cm	36 - 46cm	100kg	2,0kg
537 d.C.	43cm	68 - 80cm	48cm	41cm	38cm	40 - 52cm	100kg	3,1kg
537 d.C.	43cm	-	48cm	41cm	38cm	40 - 52cm	100kg	2,2kg

GARANTIA

A garantia estende-se por 2 anos, de acordo com a Lei de Garantia em vigor, que se refere a todos os defeitos de material ou de fabrico. Os danos causados por desgaste natural ou uso indevido estão excluídos da garantia.

Se necessitar de reparação do seu produto, contacte o distribuidor que o vendeu. Através dele, a fábrica dar-lhe-á todo o apoio da sua garantia.



Importado por:
Sida Tecno Dinámicas SL
Llobregat, 12
08130 Santa Perpétua - Barcelona
tel. 935 74 74 74 fax. 935 74 74 75
info@ayudasdinamicas.com
www.ayudasdinamicas.com

