




MANUAL

Rev 2016-08

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

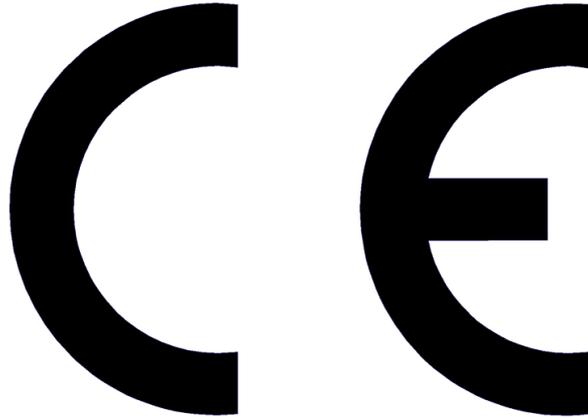

O fabricante

Neatech.it

4/A, A. de Curtis, 80040, Cercola (NA), Itália

Sob sua responsabilidade, declara que

A cadeira de rodas Job Walker

satisfaz as condições estabelecidas pela Diretiva Europeia 93/42 e as suas atualizações subsequentes;

de acordo com os critérios de classificação do Anexo IX desta diretiva, é classificada como

dispositivo médico classe I

SUMÁRIO

1	APRESENTAÇÃO DO PRODUTO.....	1
2	PREPARAÇÃO PARA A PRIMEIRA UTILIZAÇÃO.....	2
2.1	Verificações a fazer na entrega	2
2.2	Desembalamento	3
3	AJUSTES.....	7
3.1	Lista de ajustes	7
3.2	Profundidade do assento	8
3.3	Altura do punho de condução	9
3.4	Profundidade do punho de condução.....	10
4	USO DO PRODUTO	12
4.1	Usar o travão	14
4.2	Usar como assento em veículo motorizado	15
4.3	Usar como andarilho	15
4.4	Usar como cadeira de rodas	16
4.5	Transportar e guardar a cadeira.....	17
5	MANUTENÇÃO.....	19
5.1	Manutenção e limpeza	19
5.2	Controlos a realizar no produto	20
5.2.1	Circunferência do pneu	21
5.3	Furo num pneu	22
5.4	Peças sobressalentes.....	23
5.4.1	Patim.....	24
5.4.2	Almofadamento de tubo dianteiro do assento.....	25
5.4.3	Punho de condução	26
5.4.4	Apoio de braço.....	27
5.4.5	Parte superior da cadeira de rodas	28
5.4.6	Barra superior do encosto	29
5.4.7	Barra frontal do assento.....	30
5.4.8	Tela de encosto.....	31
5.4.9	Tela de assento.....	32


6	ESPECIFICAÇÕES	33
6.1	Peso.....	36
6.2	Dimensões	37
7	TERMOS DA GARANTIA.....	38
7.1	Número de série	38
	Notas.....	39

Símbolos deste manual



AVISO

Este símbolo significa a presença de perigo para o utilizador ou danos para o produto. Siga sempre as instruções quando este símbolo estiver presente.

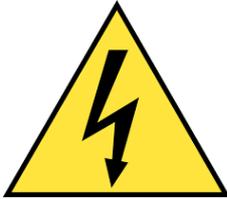

AVISO ELÉTRICO

Este símbolo significa a presença de perigo relacionado com energia elétrica. Preste atenção especial quando este símbolo estiver presente.



RISCO DE ENTALAMENTO

Este símbolo significa a presença de risco de entalamento.



INFORMAÇÃO

Este símbolo significa informações gerais destinadas a simplificar ou explicar melhor o uso do produto.



INFORMAÇÃO DE CONTACTO

Este símbolo significa a necessidade de entrar em contacto com um centro de serviço autorizado ou o fabricante.



TEMPERATURA

A temperatura de algumas superfícies pode aumentar quando a cadeira é exposta a fontes externas de calor como a luz solar.



PERIGO DE QUEDA

O risco de queda é fortemente reduzido devido ao design da cadeira de rodas de acordo com EN 12182.

Em qualquer caso, preste atenção especial durante os ajustes e uso da cadeira de rodas para evitar danos ao utilizador ou aos objetos.

Preste particular atenção durante as operações de inclinação e abertura e fechamento do chassi (se a cadeira de rodas for dobrável)

Qualquer transporte numa inclinação maior que a inclinação de segurança máxima pode ser perigoso.

Não se sente no apoio de braço



OBSTÁCULOS

Subir lancis ou obstáculos pode provocar quedas e lesões corporais graves. Se não tiver a certeza se pode subir com segurança qualquer lancil ou obstáculo, PEÇA SEMPRE AJUDA. Esteja ciente das suas capacidades de condução e limitações pessoais. Treine as suas habilidades de condução apenas com a ajuda de um companheiro.



A cadeira tem um centro de equilíbrio e, portanto, a sua estabilidade pode ser afetada por:

- Posição do utilizador
- Uso de uma mochila
- Inclinação do assento



RISCO DE ENTALAMENTO – AVISOS

Certifique-se de que os seus pés não ficam “pendurados” ou presos no espaço entre os patins. Em geral, certifique-se de que as áreas por onde quer passar têm espaço suficiente para evitar ficar preso ou entalar partes do corpo.

AVISO: É proibido o uso da cadeira de rodas ou suas peças para qualquer fim diferente do indicado. Para um uso correto, siga as instruções fornecidas neste manual. A NEATECH.IT isenta-se de qualquer responsabilidade por danos causados pelo uso impróprio das cadeiras.

A NEATECH.IT isenta-se de qualquer responsabilidade por seleções inadequadas de modelos de cadeiras de rodas

As informações neste manual podem estar sujeitas a alterações sem aviso prévio. Todas as informações, imagens e especificações são baseadas nas informações do produto disponíveis no momento da impressão. São exemplos representativos e não pretendem ser exatamente como a cadeira de rodas real

MODIFICAÇÕES

Quaisquer modificações não autorizadas na cadeira de rodas podem aumentar o risco de lesões pessoais e danos à cadeira de rodas. Todas as modificações devem ser feitas por um centro de serviço autorizado. Não use acessórios ou peças sobressalentes não autorizados na cadeira de rodas. Não use a cadeira de rodas em combinação com outros dispositivos médicos sem primeiro ter considerado qualquer risco devido à combinação de mais produtos.

FABRICANTE

Para qualquer dúvida não explicitamente explicada neste manual, entre em contacto com o fabricante.

Neatech.it SRL

4/A, A. de Curtis, 80040, Cercola (NA), Itália
www.neatech.it – info@neatech.it - +39 081 555 1946

RELATÓRIOS DE INCIDENTES

Se ocorrer um incidente, entre em contacto com um centro de serviço autorizado. Para obter uma lista de centros de serviços autorizados, entre em contacto com o fabricante.

DESCARTE



Este produto e todos os seus componentes não podem ser tratados como lixo doméstico. Para obter informações mais detalhadas sobre como reciclar e descartar este produto, entre em contacto com o serviço de recolha de lixo local.

1 APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

Job Walker é um andarilho que permite que pessoas com deficiências temporárias ou permanentes tenham acesso a ambientes hostis, como praia ou neve. Isso é obtido graças ao uso de soluções inovadoras patenteadas da Neatech, como as rodas feitas de material plástico com deformação controlada que não afundam em solos moles. A armação é feita em liga leve de alumínio, material que garante uma alta resistência tanto à tensão causada pelo suporte do peso do utilizador como à resistência à tração, e à corrosão do ambiente salino. O Job Walker é um andarilho para pessoas com deficiência física ou simplesmente com problemas de mobilidade devido à idade, que desejam lidar com solos moles e irregulares onde seria impossível usar os auxiliares tradicionais. As rodas, garantindo sempre a maior superfície possível de contacto com o solo, permitem a deslocação não só na areia ou neve, mas também noutros tipos de solos irregulares como relvados, o que torna este produto um auxiliar válido e útil em todas as estações do ano e em todos os contextos. O assento dobrável permite que o utilizador se sente para uma pausa no caminho ou para desfrutar da paisagem. O encosto e o assento são confeccionados em tecido resistente caracterizado pela secagem rápida que não agarra os grãos de areia.

Comprimento total	380 mm
Largura total	900 mm
Altura do assento	500 mm
Peso total da cadeira	20 kg
Peso máximo do utilizador	100 kg
Largura do assento	460 mm
Largura do encosto	460 mm
Altura total	880 : 960 mm



2 PREPARAÇÃO PARA A PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

2.1 Verificações a fazer na entrega

- Verifique a integridade da embalagem original.
- Verifique anomalias nos documentos de transporte.
- Verifique a funcionalidade e integridade do dispositivo no seu todo na altura da entrega ou logo após, para se certificar de que não tem dados resultantes do transporte.
- Certifique-se de que a superfície do dispositivo não tem está danificada, arranhada, dobrada, etc.
- Qualquer defeito ou dano encontrado deve ser imediatamente descrito nos documentos de transporte e prontamente comunicado à transportadora. Para quaisquer outras questões, contacte o fabricante.

2.2 Desembalamento

No interior da embalagem há:

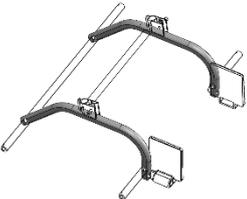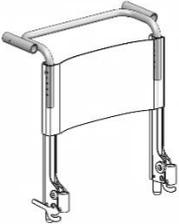	N. 4 rodas
	N. 1 Chassis da cadeira
	N. 1 Parte superior da cadeira
	N. 2 Apoio de braço
	N. 2 Punho de condução
	N. 6 cliques de fixação

Antes de começar a montar a cadeira de rodas, verifique se todos os componentes descritos estão presentes. **Caso contrário, entre em contacto o mais rápido possível com o fornecedor. Nenhuma ferramenta é necessária para montar a cadeira de rodas. Nenhuma peça com peso superior a 10 kg deve ser manuseada durante o desembalamento da cadeira de rodas**

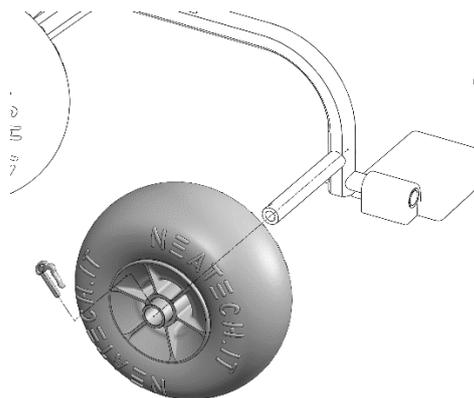


Figura 1

- Insira as rodas no eixo do chassis da cadeira.
- Bloquee as rodas com o clipe de fixação.
- Repita o procedimento para as quarto rodas.

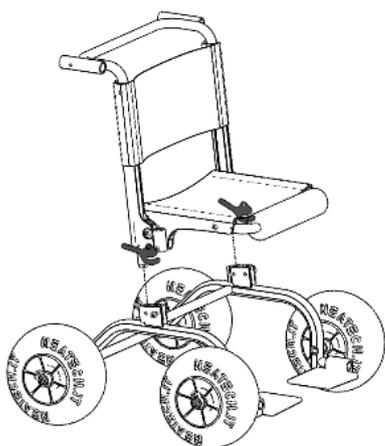


Figura 2

- Insira a parte superior da cadeira no chassis.
- Bloquee a parte superior com os dois manípulos mostrados na figura.

PESO

O peso do chassis da cadeira é de cerca de 4 kg. Agarre nele com as duas mãos pelas barras mostradas na Figura 3.

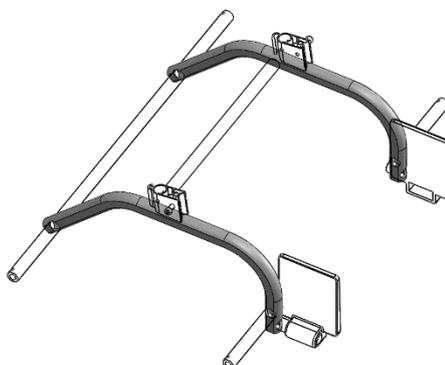


Figura 3

PESO

O peso da parte superior da cadeira é de cerca de 5 kg. Agarre nele com as duas mãos pelas barras mostradas na Figura 4.



Figura 4

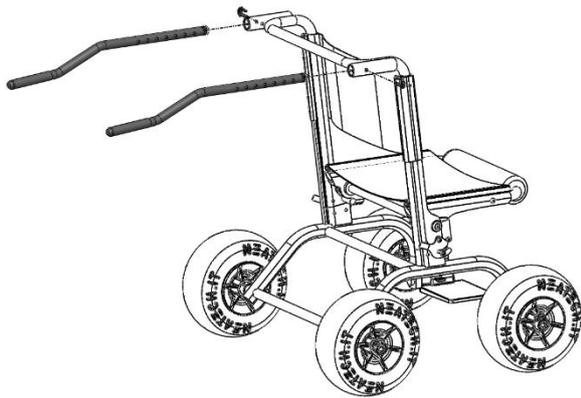


Figura 5

- Insira o punho de condução na parte superior da cadeira de rodas.
- Bloqueie-a com um clipe de fixação.
- Repita o procedimento para os dois lados da cadeira de rodas.

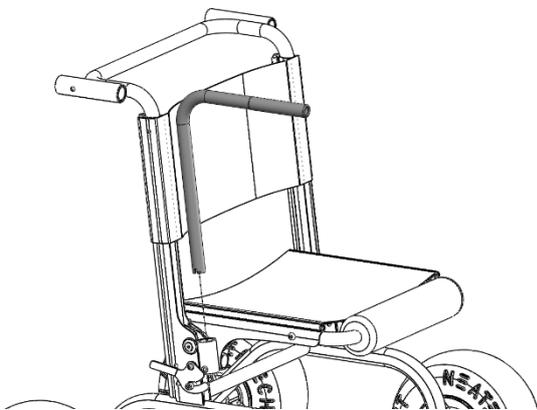


Figura 6

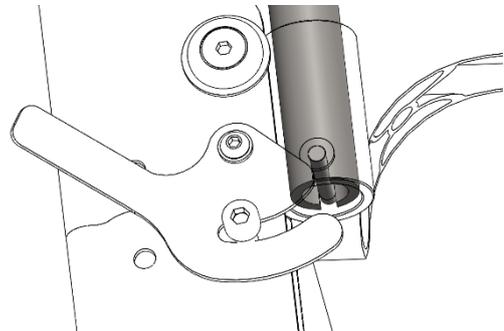


Figura 7

- Insira os apoios de braços na parte superior da cadeira de rodas.



DESCARTE DA EMBALAGEM

Para reciclar convenientemente a embalagem, siga as instruções fornecidas pelo seu serviço de recolha de lixo local.

3 AJUSTES

3.1 Lista de ajustes

Tipo de operação	
A	Operação destinada a ser realizada pelo utilizador
B	Operação destinada a ser realizada por um auxiliar
C	Operação destinada a ser realizada por um centro de serviço autorizado

Ajuste	Tipo de operação
Profundidade do assento	B - Auxiliar
Altura do punho de condução	B – Auxiliar
Profundidade do punho de condução	B – Auxiliar (se usado como cadeira de rodas) A – Utilizador (se usado como andarilho) Para mais informações, ver secção Error! Reference source not found. e Error! Reference source not found.

Tabela 1

3.2 Profundidade do assento


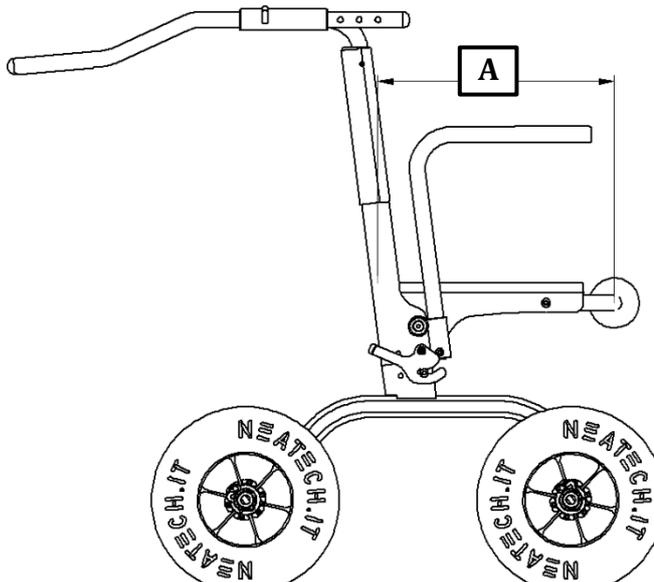
	(A) POSSÍVEIS ESCOLHAS
	39.0 cm
	41.5 cm
	44.0 cm

Tabela 2

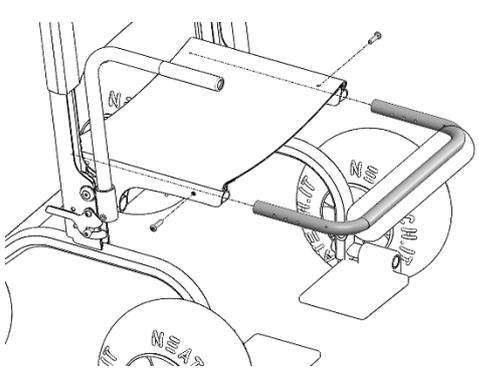

Chave Allen 5 mm

Figura 8

- Desaperte os dois parafusos mostrados na figura.
- Puxe ou empurre a barra mostrada para ajustar a profundidade do assento.
- Volte a apertar os parafusos.

3.3 Altura do punho de condução

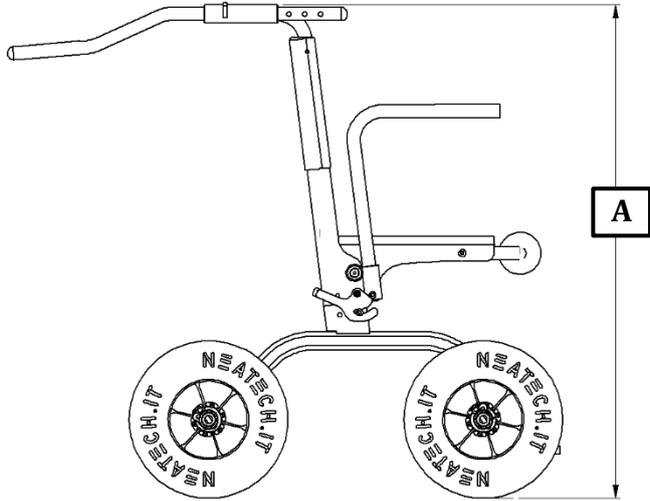
	(A) POSSÍVEIS ESCOLHAS
	94.0 cm
	96.0 cm
	98.0 cm
	100.0 cm
102.0 cm	

Tabela 3

Chave Allen 5 mm

Figura 9

- Desaperte o parafuso mostrado na figura.
- Repita a operação para os dois lados da cadeira.
- Ajuste a altura do punho de condução.
- Volte a apertar os parafusos.

3.4 Profundidade do punho de condução



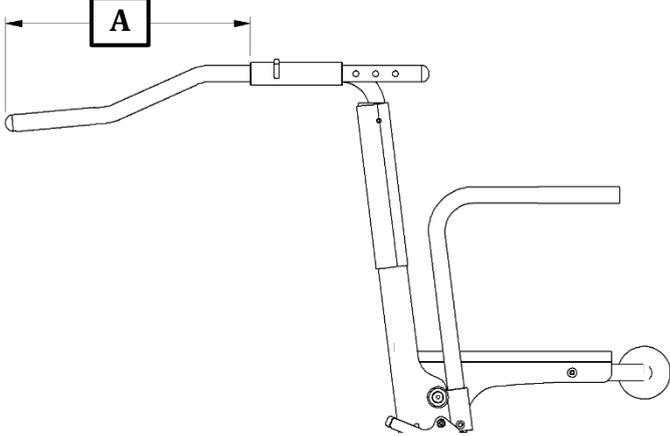
	<p style="text-align: center;">(A) POSSÍVEIS ESCOLHAS</p> <p style="text-align: center;">37.0 cm</p> <p style="text-align: center;">40.0 cm</p> <p style="text-align: center;">43.0 cm</p> <p style="text-align: center;">46.0 cm</p> <p style="text-align: center;">49.0 cm</p> <p style="text-align: center;">52.0 cm</p> <p style="text-align: center;">55.0 cm</p>
	<p style="text-align: center;">(B) POSSÍVEIS ESCOLHAS</p> <p style="text-align: center;">31 cm</p> <p style="text-align: center;">34 cm</p> <p style="text-align: center;">37 cm</p> <p style="text-align: center;">40 cm</p> <p style="text-align: center;">43 cm</p> <p style="text-align: center;">46 cm</p> <p style="text-align: center;">49 cm</p>

Tabela 4

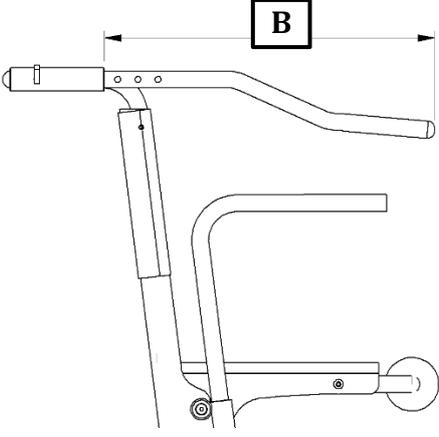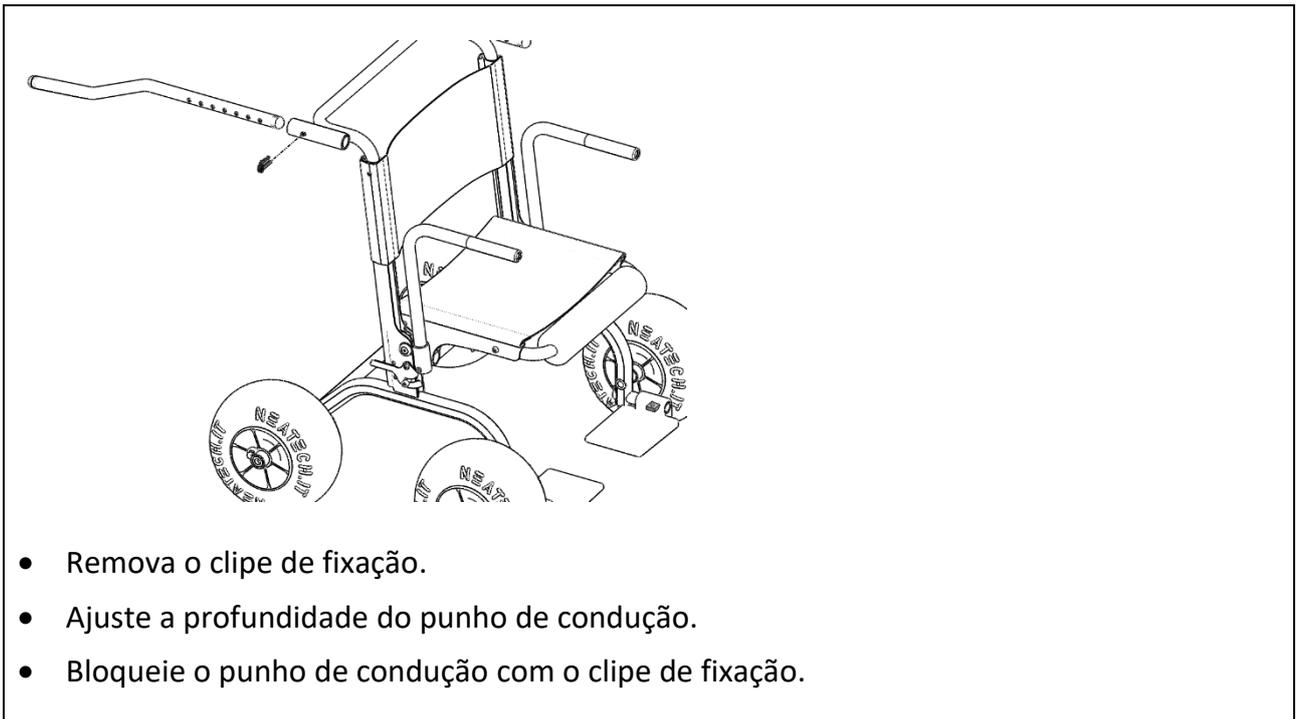

INFORMAÇÃO

É possível ajustar separadamente a profundidade as barras de condução esquerda e direita.

4 USO DO PRODUTO



Não use A cadeira de rodas em escadas ou escadas rolantes. Não levante ou mova a cadeira de rodas por qualquer uma de suas partes removíveis.

Não use a cadeira de rodas se o seu peso exceder o peso máximo do utilizador escrito nas especificações deste manual de instruções.

Não transporte passageiros na cadeira de rodas independentemente da idade do passageiro. A cadeira de rodas não foi projetada para treino com pesos e não é segura para uso como assento durante o treino com pesos. O treino com pesos na cadeira de rodas altera substancialmente a estabilidade desta e provoca quedas. Não se incline sobre o encosto para alcançar objetos por trás, pois isso pode fazer com que a cadeira de rodas tombe. Não mude o seu peso ou posição sentada na direção que está a tentar alcançar, pois a cadeira de rodas pode tombar para trás ou para os lados. Não se apoie na estrutura da cadeira. Tenha sempre atenção ao entrar ou sair da cadeira de rodas. Todas as precauções devem ser tomadas para reduzir a distância de transferência. Certifique-se também de que as rodas estão travadas para evitar que estas se movam.

Não deixe crianças usarem a cadeira de rodas sem supervisão.

Algumas patologias podem limitar a sua capacidade de usar a cadeira com segurança. Consulte um médico sobre as suas limitações físicas.



A cadeira de rodas não se destina a ser desmontada. Não se espera que nenhuma parte da cadeira de rodas seja manuseada durante o uso normal dela.



Não instale, mantenha ou opere sua cadeira de rodas sem ler todos os avisos e todo o manual de instruções.

Guarde sempre este manual junto com a cadeira de rodas.

Lidar com subidas

A cadeira de rodas não foi projetada para lidar com subidas. Preste atenção especial ao lidar com subidas.

Lidar com descidas

A cadeira de rodas não foi projetada para lidar com descidas. Preste atenção especial ao lidar com descidas.



AVISO

Não use a cadeira de rodas em rampas que não estejam equipadas com proteção de borda para evitar que a cadeira de rodas caia



AVISO

Não use a cadeira de rodas em inclinações se a superfície estiver coberta de neve, gelo, ou for irregular.

Lidar com encostas laterais

A cadeira de rodas não foi projetada para lidar com encostas laterais. Preste atenção especial ao lidar com encostas laterais.

Virar com a cadeira de rodas

Não faça a cadeira de rodas virar a altas velocidades.

Subir de obstáculos

A cadeira de rodas não foi projetada para subir obstáculos.

Conduzir em ambientes escuros

Não use a cadeira de rodas em ambientes escuros.

Cinto de segurança

A cadeira de rodas pode ser adaptada com um cinto pélvico que pode ser adquirido como acessório. **O cinto pélvico é projetado apenas para posicionar o utilizador e não para qualquer proteção em caso de acidente.**

Entrar e sair da cadeira

Recomenda-se entrar e sair da cadeira com ajuda de um acompanhante.
Não se apoie nos patins ou apoios de braços.

Levantar a cadeira

Não levante a cadeira com uma pessoa sentada nela; se precisar mesmo de fazer isso, recomenda-se que o faça pelas partes realçadas na Figura 10.

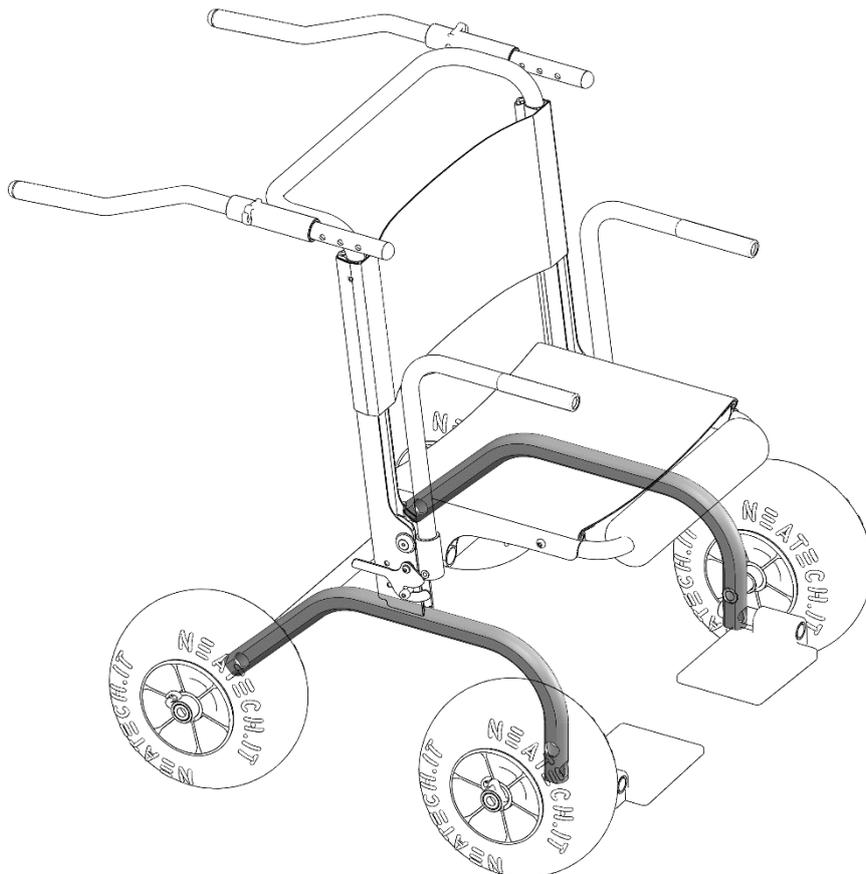


Figura 10

4.1 Usar o travão

A cadeira de rodas não tem travões.

4.2 Usar como assento em veículo motorizado



Não é possível usar a cadeira como assento em veículos motorizados.

4.3 Usar como andarilho

Pode usar este produto como andarilho.

Levante o assento.

Levante os patins.

Coloque as barras de condução como mostra a Figura 11. Para mover as barras de condução, destrave os cliques de fixação, coloque-as em posição e volte a bloqueá-las com os cliques de fixação.

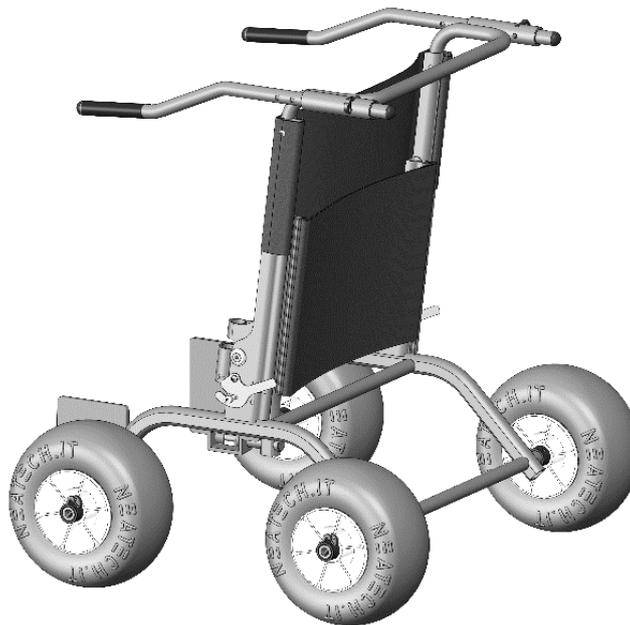


Figura 11

4.4 Usar como cadeira de rodas

É possível usar o produto como cadeira de rodas.

Desça o assento.

Coloque as barras de condução como mostra a Figura 12. Para mover as barras de condução, destrave os cliques de fixação, coloque-as em posição e volte a bloqueá-las com os cliques de fixação.



Figura 12

4.5 Transportar e guardar a cadeira

Se você não for usar a cadeira de rodas por um longo período, mantenha-a segura numa área limpa e longe de fontes de calor.

Se tiver de transportar a cadeira, para facilitar a operação, siga estas instruções.

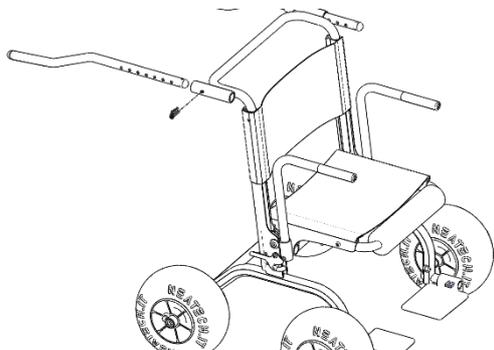


Figura 13

- Remova o clipe de fixação.
- Remova o punho de condução.
- Repita a operação para os dois lados da cadeira.

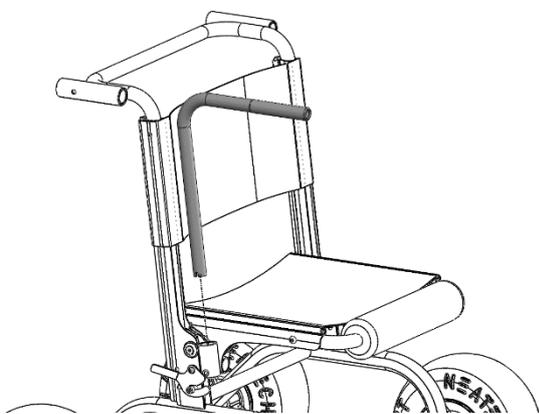


Figura 14

- Remova os apoios de braços.

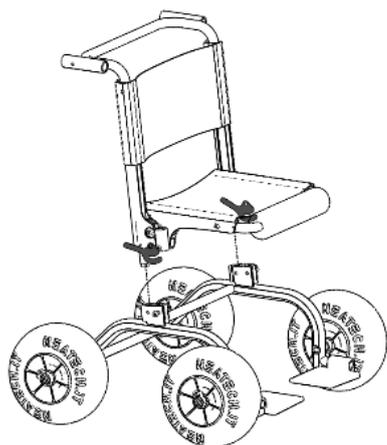


Figura 15

- Remova a parte superior da cadeira com os dois manípulos mostrados na figura.

A cadeira de rodas pode ser transportada na mala do veículo mesmo sem qualquer embalagem.

Caso seja necessário despachar a cadeira de rodas é muito importante protegê-la com uma embalagem apropriada.

Não é possível fornecer uma embalagem universal, por isso o utilizador deve obter uma. A embalagem usada deve ser:

- Impermeável a água e poeiras
- Suficientemente resistente para proteger a cadeira de danos
- Ao colocar a cadeira na embalagem, proteja quaisquer partes salientes com espuma ou material semelhante.

Para voltar a montar a cadeira, siga as instruções na ordem inversa.

5 MANUTENÇÃO

Lembre-se de que a cadeira de rodas se destina exclusivamente ao transporte de pessoas sentadas e deve ser utilizada com os apoios de pernas, patins e apoios de braços montados. Seguem abaixo alguns cuidados com o uso da cadeira de rodas, que recomendamos seguir, para garantir um uso seguro e duradouro.

- Evite o contacto prolongado da cadeira com a água. Pode causar oxidação das partes metálicas.
- Antes de usar a cadeira, verifique se as rodas traseiras estão bem encaixadas.



Qualquer trabalho na cadeira de rodas deve ser realizado por um centro de serviço autorizado.

5.1 Manutenção e limpeza

A manutenção regular ajuda a manter intacta a funcionalidade e a segurança do LB. Manutenção inadequada ou a falta de cuidados e manutenção podem limitar a garantia do fabricante.


Para limpar a cadeira, não use dispositivos de pulverização de água de alta pressão. Para as peças de plástico e metal, use um pano macio humedecido com detergente neutro. Para o estofado, forros, e coberturas do assento e do encosto, use água morna e detergente neutro. Não use removedores de nódoas, solventes, ácidos, etc.

5.2 Controlos a realizar no produto

Tipo de operação	
A	Operação destinada a ser realizada pelo utilizador
B	Operação destinada a ser realizada pelo auxiliar
C	Operação destinada a ser realizada por um centro de serviço autorizado

OPERAÇÕES	FREQUÊNCIA	TIPO DE OPERAÇÃO
<p>Verificar se os cliques de fixação das barras de condução estão posicionados corretamente</p> <p>Para mais informações, ver secção Error! Reference source not found..</p>	Antes de cada utilização como andarilho	A – Utilizador
<p>Verificar se a parte superior está fixada corretamente.</p> <p>Para mais informações, ver Figura 7 (pág. 6)</p>	Antes de cada utilização	
<p>Verificar o desgaste dos pneus</p>	Mensalmente	B – Auxiliar
<p>Verificar a circunferência dos pneus</p> <p>Verifique se a circunferência dos pneus tem o valor indicado na secção Error! Reference source not found..</p>	Semanalmente	B – Auxiliar

5.2.1 Circunferência do pneu

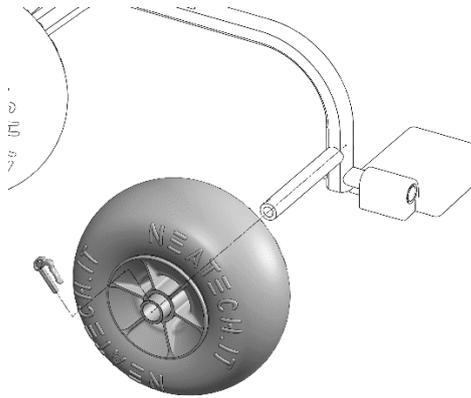

- Remova o clipe de fixação.
- Remova a roda.



- Certifique-se de que a circunferência da roda tem entre 81 cm e 84 cm.
- Se não, ajuste a pressão de ar até que a circunferência atinja os valores recomendados.




Certifique-se de que **a circunferência das rodas tem entre 81 cm e 84 cm.**

Se não, ajuste a pressão de ar até que a circunferência atinja os valores recomendados.

- Volte a montar a roda seguindo as instruções na ordem inversa.
- Repita a operação para as quarto rodas.

5.3 Furo num pneu

Em caso de furo num pneu, siga estas instruções.

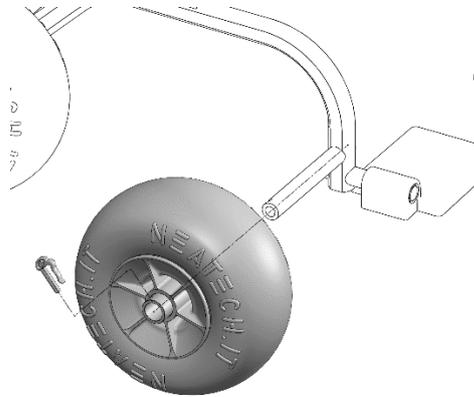

- Remova o clipe de fixação.
- Remova a roda.
- Limpe a superfície danificada com álcool etílico.
- Quando a superfície estiver seca, aplique algumas gotas de cola para PVC rígido.
- Espere alguns minutos que a cola seque e depois encha os pneus como descrito na secção **Error! Reference source not found.**



Se isto não resultar, deve substituir a roda.

Código	Descrição	Nota
R107-0010	Roda	

5.4 Peças sobressalentes

O utilizador pode comprar num centro de serviço autorizado e pode substituir ele próprio ou com a ajuda de um auxiliar. Se desejar, o utilizador pode solicitar a ajuda do centro de serviço autorizado para a substituição.

Código	Descrição	Nota
R107-0010	Roda	
R107-0020	Patim	
R107-0030	Almofadamento de tubo dianteiro do assento	
R107-0040	Punho de condução	
R107-0041	Almofadamento do punho de condução/apoio de braço	
R107-0050	Apoio de braço	
R107-0060	Parte superior da cadeira de rodas	
R107-0061	Barra superior do encosto	
R107-0062	Barra frontal do assento	
R107-0070	Tela de encosto	
R107-0080	Tela de assento	
R107-0090	Cinto pélvico	




O uso de peças sobressalentes ou acessórios não aprovados pelo fabricante pode tornar a cadeira de rodas instável ou incontroável.

Para cada pedido, contacte sempre um centro de serviço autorizado




Para quaisquer outras partes não descritas neste manual, entre em contacto com o fabricante

5.4.1 Patim

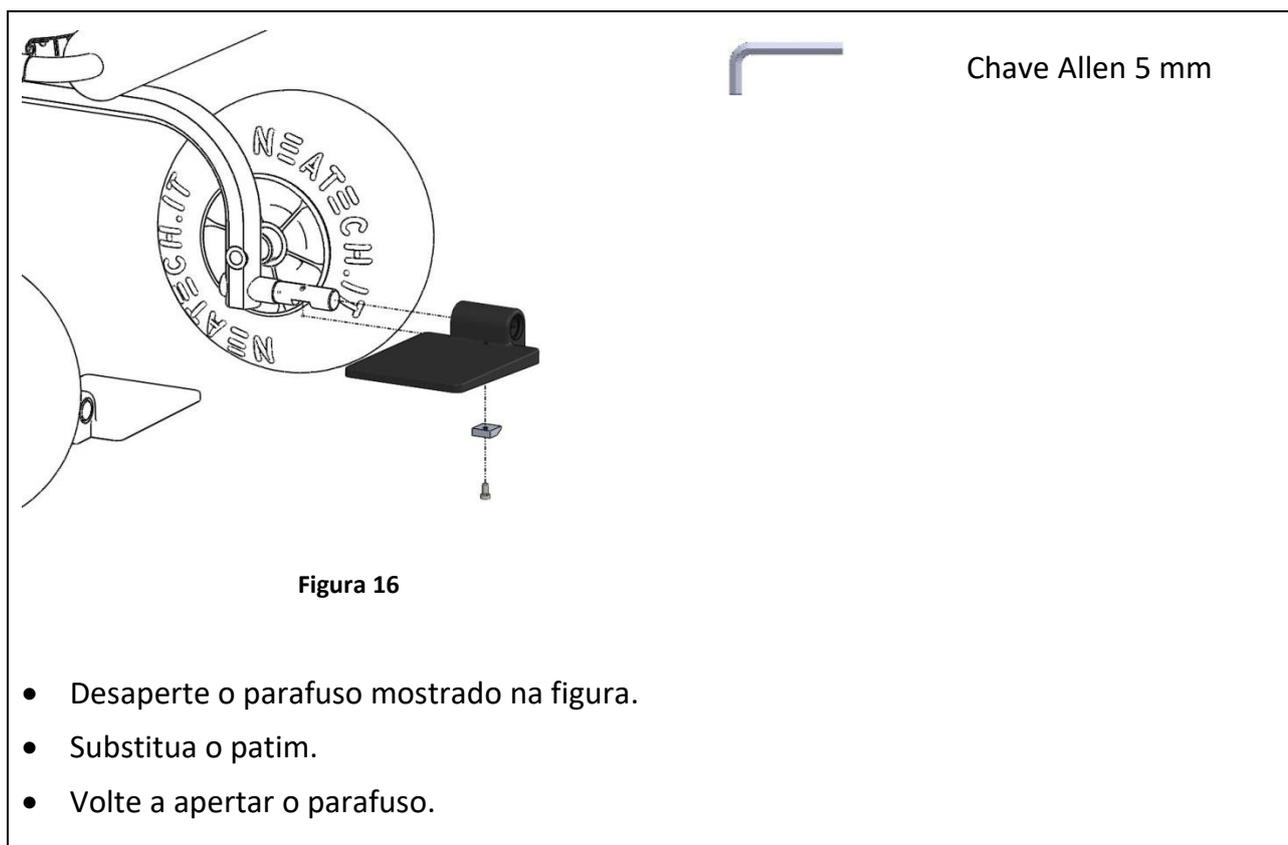

Código	Descrição	Nota
R107-0020	Patim	

5.4.2 Almofadamento de tubo dianteiro do assento

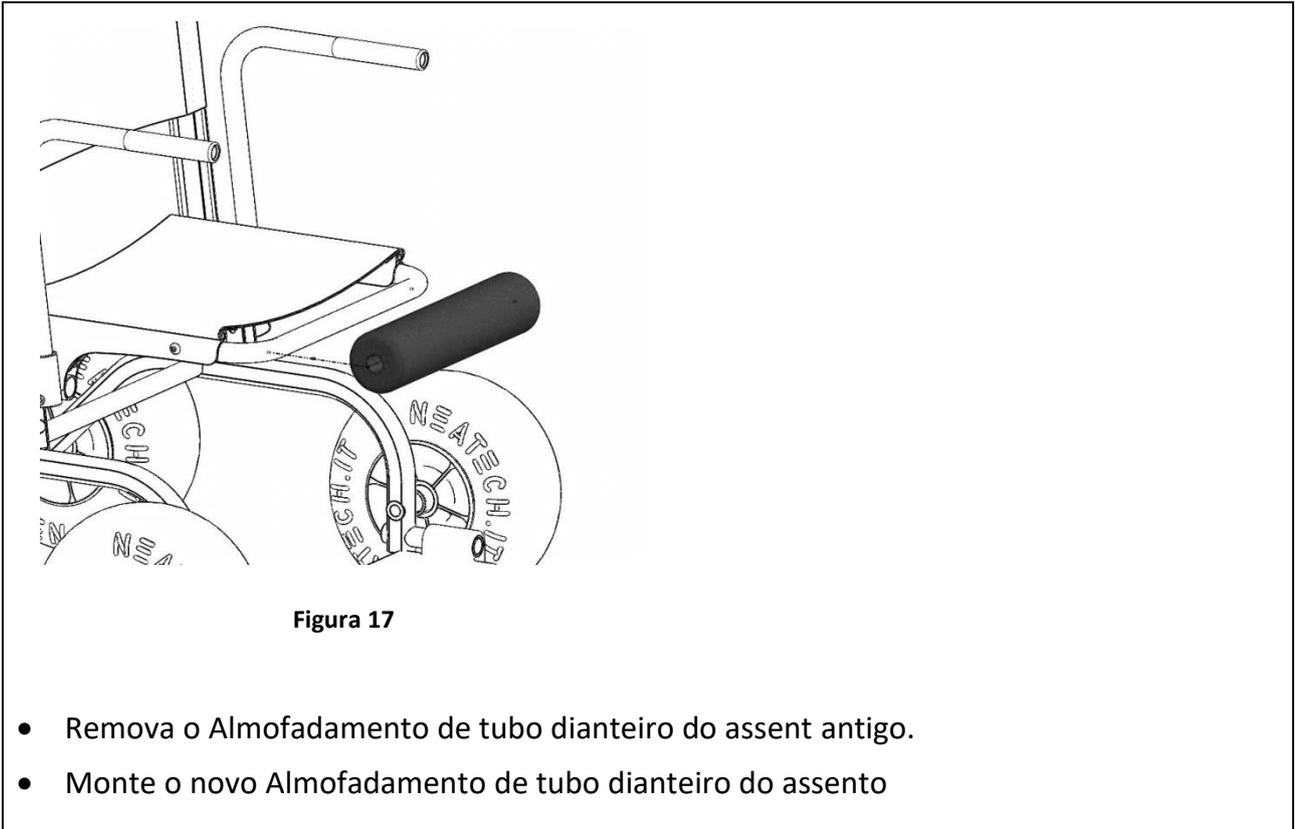

Código	Descrição	Nota
R107-0030	Almofadamento de tubo dianteiro do assento	

5.4.3 Punho de condução

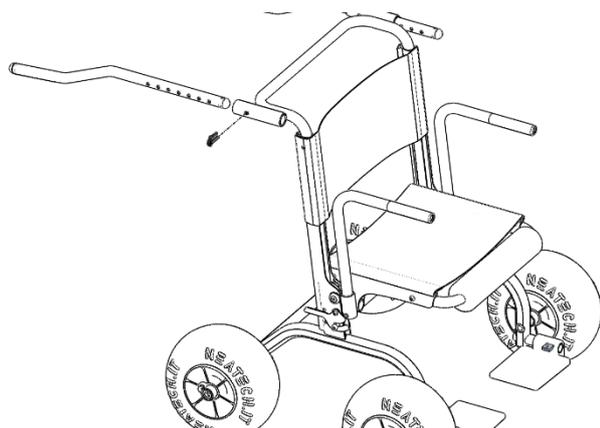


Figura 18

- Remova o clipe de fixação.
- Substitua o punho de condução.
- Bloqueie-a com o clipe de fixação.

Se necessário, é possível substituir apenas o Amofadamento punho de condução.

Código	Descrição	Nota
R107-0040	Punho de condução	
R107-0041	Amofadamento punho de condução/apoio de braço	

5.4.4 Apoio de braço

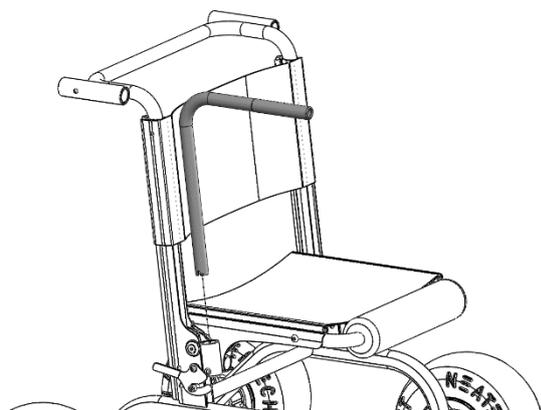


Figura 19

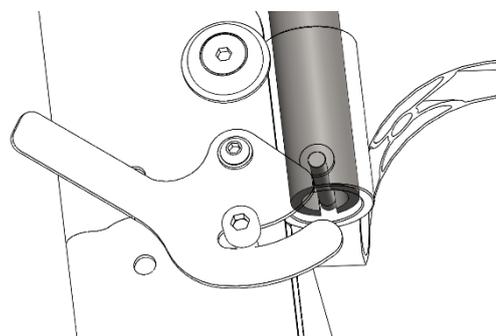


Figura 20

- Remova o apoio de braço antigo.
- Monte o novo apoio de braço.

Se necessário, também é possível substituir apenas o amofadamento do punho de condução.

Código	Descrição	Nota
R107-0050	Apoio de braço	
R107-0042	Amofadamento punho de condução/apoio de braço	

5.4.5 Parte superior da cadeira de rodas


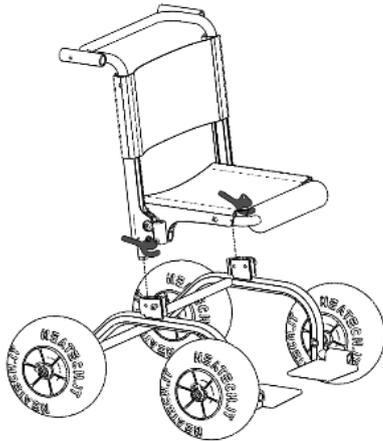


Figura 21

- Remova as duas barras de condução seguindo as instruções da secção **Error! Reference source not found.**
- Remova os dois apoios de braços seguindo as instruções da secção **Error! Reference source not found.**
- Remova a parte superior da cadeira de rodas com os manípulos mostrados na figura.
- Monte a nova parte superior da cadeira seguindo as instruções na ordem inversa.
- Monte as duas barras de condução seguindo as instruções da secção **Error! Reference source not found.**na ordem inversa.
- Monte os dois apoios de braços seguindo as instruções da secção **Error! Reference source not found.**na ordem inversa.

Código	Descrição	Nota
R107-0060	Parte superior da cadeira de rodas	

5.4.6 Barra superior do encosto

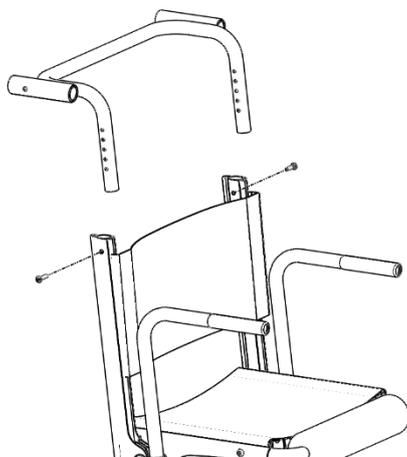


Chave Allen 5 mm

Figura 22

- Remova as duas barras de condução seguindo as instruções da secção **Error! Reference source not found.**
- Desaperte os parafusos mostrados na figura.
- Substitua a barra superior do encosto.
- Volte a apertar os parafusos.
- Volte a montar as barras de condução seguindo as instruções na ordem inversa.

Código	Descrição	Nota
R107-0061	Barra superior do encosto	

5.4.7 Barra frontal do assento

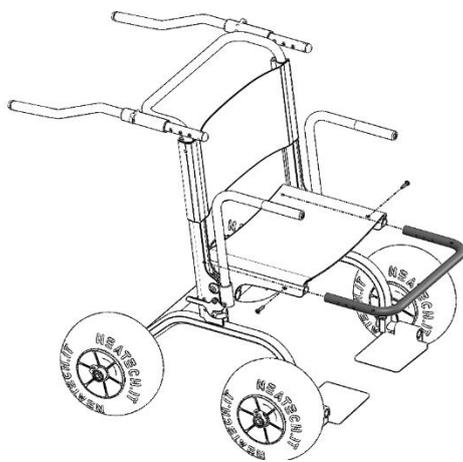

Chave Allen 5 mm

Figura 23

- Remova o Almofadamento de tubo dianteiro do assento como mostra na secção **Error! Reference source not found.**
- Desaperte os dois parafusos mostrados na figura.
- Remova a barra frontal do assento antiga.
- Monte a nova barra frontal do assento.
- Volte a apertar os dois parafusos.
- Monte o Almofadamento de tubo dianteiro do assento antigo seguindo as instruções da secção **Error! Reference source not found.**na ordem inversa.

Código	Descrição	Nota
R107-0062	Barra frontal do assento	

5.4.8 Tela de encosto

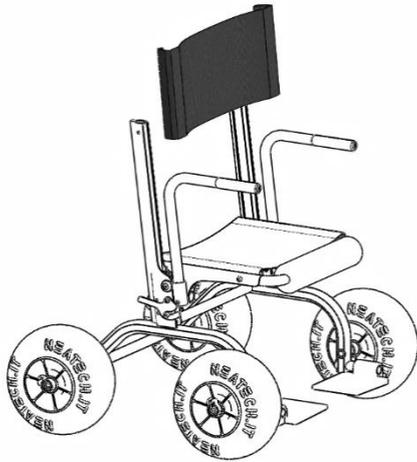


Figura 24

- Remova as duas barras de condução seguindo as instruções da secção **Error! Reference source not found.**
- Remova a parte superior do assento seguindo as instruções da secção 5.4.4
- Substitua a tela de encosto.
- Volte a montar a parte superior do encosto seguindo as instruções na ordem inversa.
- Volte a montar as barras de condução seguindo as instruções na ordem inversa.
- Desaperte os parafusos mostrados na figura.
- Substitua a barra superior do encosto.
- Volte a apertar os parafusos.

Código	Descrição	Nota
R107-0070	Tela de encosto	

5.4.9 Tela de assento

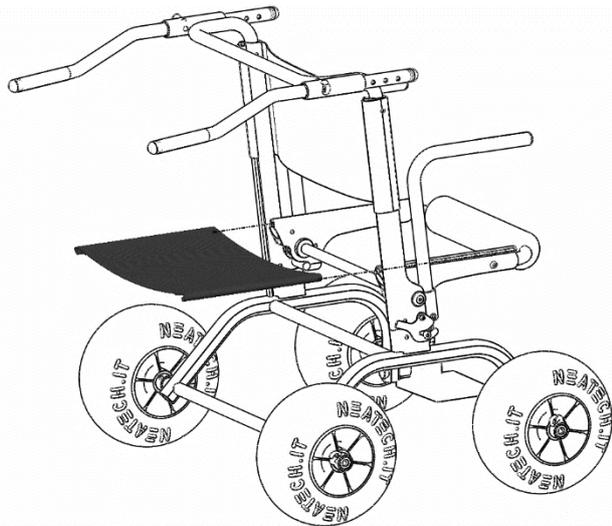


Figura 25

- Baixe o assento.
- Retire a tela de assento antiga.
- Monte a nova tela de assento.

Código	Descrição	Nota
R107-0080	Tela de assento	

6 ESPECIFICAÇÕES

Esperança de vida	5 anos
Uso pretendido	A Job Walker destina-se a todas as categorias de utilizadores com dificuldades de mobilidade temporária ou permanente que precisam de fazer viagens para a praia e outros tipos de superfícies irregulares.
Peso máximo do utilizador	100 kg

Tabela 5

AVISO: É proibido o uso da cadeira de rodas ou suas peças para qualquer fim diferente do indicado. Para um uso correto, siga as instruções fornecidas neste manual. A NEATECH.IT isenta-se de qualquer responsabilidade por danos causados pelo uso impróprio das cadeiras.

É possível usar e armazenar a cadeira de rodas quando a temperatura estiver na faixa especificada na tabela a seguir.

Operação	Temperatura min.	Temperatura máx.
Uso	-10 °C	+40 °C
Armazenamento	-20 °C	+45 °C


Tabela 6

Fabricante	Neatech.it
Morada	via A. de Curtis 4/A – 80040 – Cercola (NA) - Itália
Modelo	S107 -Job Walker


Descrição	Valor
Comprimento total com apoio de pernas	380 mm
Largura total	900 mm
Comprimento dobrada	Não aplicável
Largura dobrada	Não aplicável
Altura dobrada	Não aplicável
Massa total (o peso pode mudar significativamente de acordo com a configuração da cadeira de rodas)	~20.0 kg
Estabilidade estática em descida	Não aplicável
Estabilidade estática em subida	Não aplicável
Estabilidade estática de lado	Não aplicável
Ângulo do assento	0° (90° quando dobrada)
Profundidade efetiva do assento	MIN: 390 mm MÁX: 440 mm
Largura efetiva do assento	460 mm
Altura da superfície do assento na borda frontal:	480 mm
Ângulo do encosto	90°

Altura do encosto	400 mm
Distância do patim ao assento	360 mm
Ângulo da perna em relação ao assento	90°
Distância do apoio de braço ao assento	250 mm

6.1 Peso

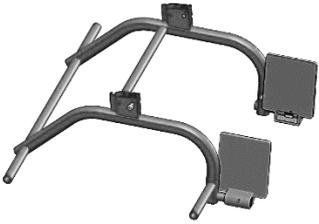	N. 4 rodas	~1.8 kg cada roda
	N. 1 Chassis da cadeira de rodas	~4.0 kg
	N. 1 Parte superior da cadeira de rodas	~5.0 kg
	N. 2 Apoios de braço	~1 kg cada apoio de braço
	N. 2 punho de condução	~0.5 kg cada punho de condução
	N. 6 cliques de fixação	

6.2 Dimensões

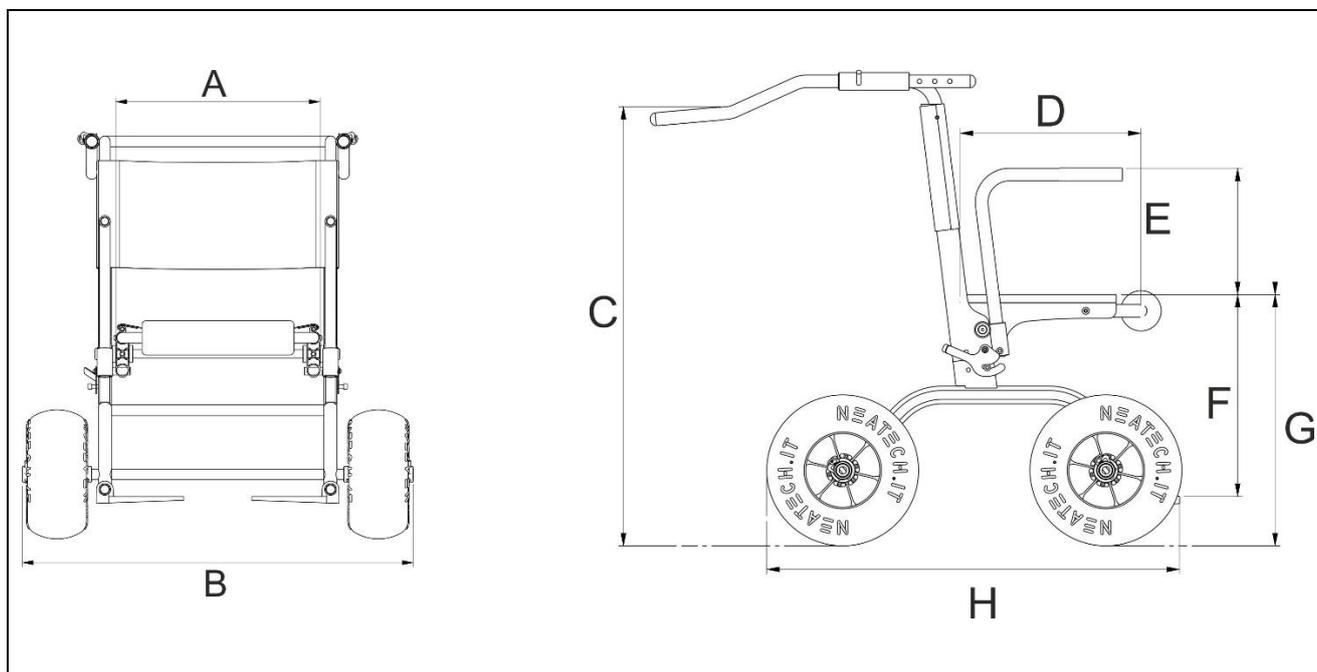

A – Largura do assento	460 mm
B – Largura total	900 mm
C – Altura total	880 – 960 mm
D – Profundidade do assento	390 – 440 mm
E – Altura do apoio de braço	480 mm
F – Apoio de perna	250 mm
G – Altura do assento	360 mm
H – Comprimento total	380 mm

MANUAL

**JOB
WALKER**

NEATECH™

www.neatech.it